



Oogdruppels ontstoken ogen

Lees deze informatie zorgvuldig voor het gebruik van A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen. Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg, het bevat belangrijke informatie. Wanneer u vragen heeft over dit product, stel deze dan aan uw arts of neem contact op met de fabrikant.

Wat is A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen en waarvoor gebruikt u het?

- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen is een medisch hulpmiddel en bevat Ectoin®, een 100% natuurlijk ingrediënt met celbeschermende en ontstekingsremmende eigenschappen.
- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen is een isotone oplossing en kan worden gebruikt om oogletsel en ontstekingsziekten van het hoornvlies en het oogoppervlak te behandelen.
- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen vermindert oogontsteking en ondersteunt wondgenezing na bijvoorbeeld oogoperaties of oogletsel.
- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen hydrateert droge ogen, voorkomt verdere uitdroging en ondersteunt het herstelproces van geïrriteerd en gevoelig bindvlies.
- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen verlicht symptomen van geïrriteerde ogen zoals jeukende, tranende, rode, droge of branderige ogen, evenals als het gevoel dat er wat in het oog zit.



- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen is geschikt voor alle leeftijden, dragers van contactlenzen en voor mensen met gevoelige ogen.
- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen bevat geen conserveringsmiddelen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor Ectoin® of een van de andere ingrediënten.
- Als er allergische reacties optreden als gevolg van het product, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen.
- Niet gebruiken als het product beschadigd is.
- Uit hygiënisch oogpunt mag het flesje slechts door één persoon worden gebruikt.
- Na opening is het product nog 6 maanden houdbaar.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Wat moet u weten voordat u A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen gebruikt?

Er zijn klinische gegevens beschikbaar voor een veilig gebruik van A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen samen met antibiotica, antiseptica of andere ontstekingsremmende behandelingen.

Hoe gebruikt u A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen?

Gebruik A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen altijd volgens deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg uw arts of apotheker voor gebruik als u twijfelt. Meerdere keren *per dag 1-2 druppels* per oog aanbrengen, tenzij anders is geadviseerd. Indien noodzakelijk, kan A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen meerdere keren per uur worden gebruikt. Dit product is geschikt voor kinderen. Niettemin, kinderen van 10 jaar of jonger en mensen die niet in staat zijn om deze oogdruppels zelfstandig te gebruiken, moeten door een volwassene geholpen worden bij de toediening.

1. Scheur voordat u A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen voor het eerst gebruikt, de beschermende verzegeling van het flesje.
2. Het wordt aanbevolen om voor gebruik van A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen uw handen te wassen.
3. Verwijder het beschermdeopje van het flesje en vermijd aanraking van de blootgestelde dop.
4. Buig uw hoofd lichtjes naar achteren.
5. Houd het flesje ondersteboven in één hand, tussen uw duim en wijsvinger of middelvinger. Houd het flesje zo verticaal mogelijk.
6. Open voorzichtig uw oog met uw duim en wijsvinger van de andere hand of trek uw onderste ooglid voorzichtig naar beneden om een buidel of zak te vormen.
7. Plaats de punt van het flesje dicht bij uw onderste ooglid, maar laat het uw oog niet raken.
8. Laat een druppel in het gevormde zakje vallen tussen uw oog en ooglid door zachtjes te knippen in de fles.
9. Sluit het oog langzaam, zodat de vloeistof zich gelijkmatig over het oogoppervlak kan verdelen.
10. Herhaal de procedure voor het andere oog.
11. Plaats het dopje na elk gebruik van de A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen voorzichtig terug.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

Als dit product wordt toegepast volgens de gebruiksaanwijzing, is er geen bewijs voor een bepaald risico tijdens zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Mogelijke bijwerkingen van A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen

A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen wordt goed verdragen. Regelmatig voorkomende of aanhoudende bijwerkingen zijn tot nu toe niet bekend. In enkele gevallen kan A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen mogelijk kortdurende oogirritatie veroorzaken, rode ogen of bindvliesontsteking. Merk u bijwerkingen na gebruik van dit middel, geef dit dan door aan uw arts of aan A.Vogel B.V. Neem contact op met uw arts of apotheker als de oogklachten aanhouden of verergeren.

Ingrediënten

Ectoin®, natriumchloride, hydroxyethylcellulose, water, citraatbuffer.

Bewaren

De vervaldatum van A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen staat vermeld op de verpakking en op het flesje. Niet gebruiken na de vervaldatum. Bewaren tussen 2°C - 25°C.

Verpakking

A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen is verkrijgbaar in een verpakking van 10 ml.

Persoonlijk advies

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Kijk dan op www.avogel.nl of bel met de A.Vogel gezondheidslijn 0900-246 46 46 of stuur een e-mail naar info@avogel.nl.

Tips

- Maak zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk daglicht en werk niet te lang achtereen met een beeldscherm.
- Draag contactlenzen niet langer dan de fabrikant aanbeveelt.
- Draag eventueel een zonnebril om lichtirritatie te voorkomen.
- Maak zo min mogelijk gebruik van airconditioning, kies liever voor een open raam.
- Probeer niet te lang aaneengesloten tv te kijken.

Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.





Fabrikant
bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Germany

Distributeur
A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16,
8081 HC Elburg, Nederland
0900-2464646

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in juni 2021.



Fabrikant

CE 0197 CE-symbool met notifiedbodynummer

Voor gebruik gebruiksaanwijzing lezen

Gebruiksaanwijzing lezen (met betrekking tot waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen)

Lotnummer

Te gebruiken tot (vervaldatum)

Het product is steriel door aseptische filtratie

Temperatuurgrenzen

Niet gebruiken als het product beschadigd of doorboord is

A.Vogel